



EASY
GRIP[®] Implants

PROTOCOLLO
CHIRURGICO

HEX
CONNECTION

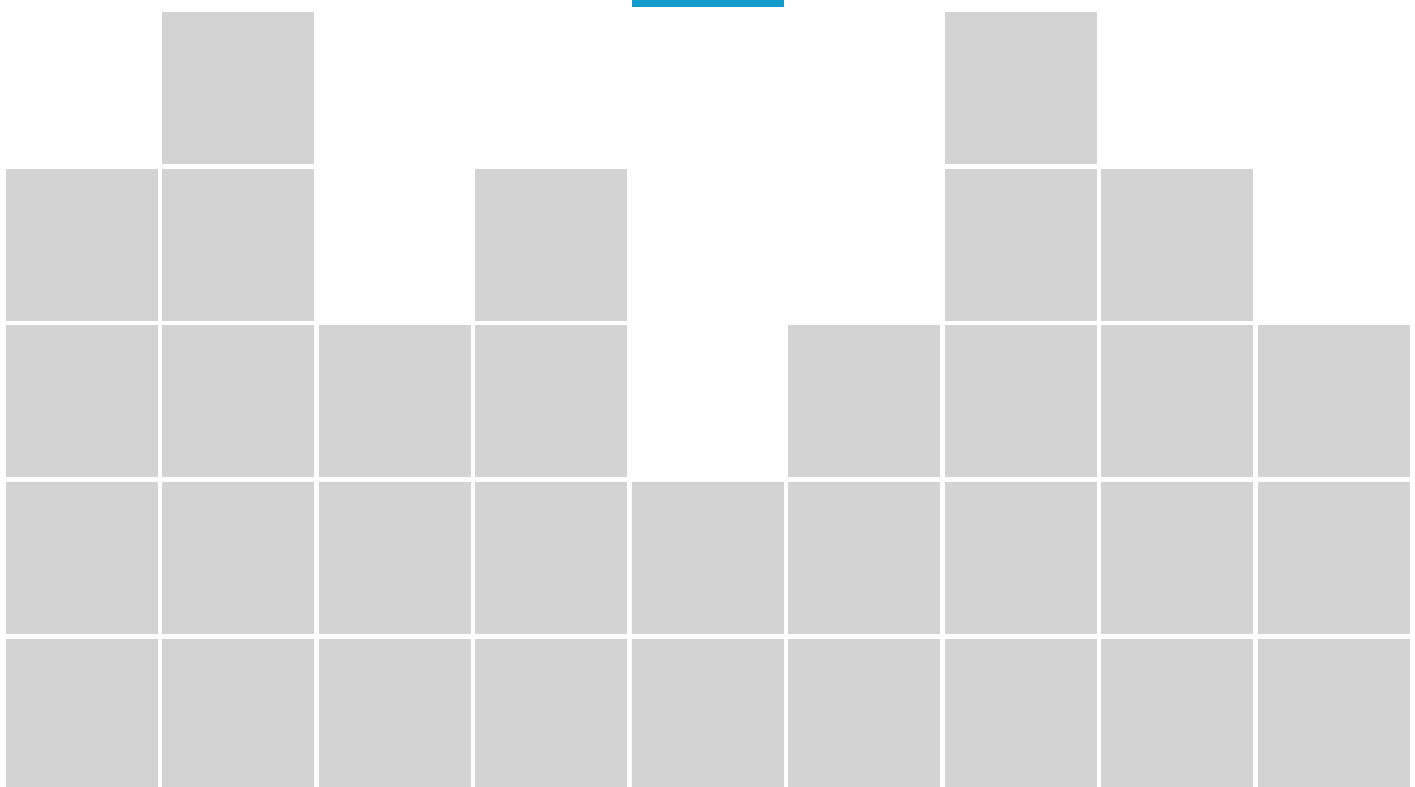

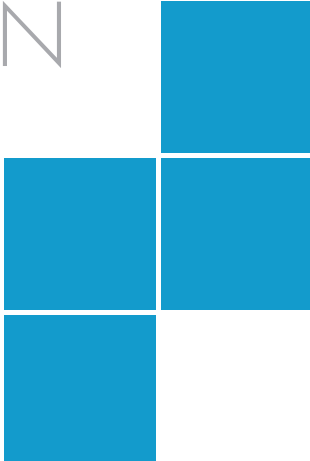

SISTEMA IMPLANTARE EASY GRIP® HEX



Serie 20 *pag. 10*

Conico

DN 3.75 - Short Neck
DN 4.50 - Large
DN 5.00 - Extra Large



Serie 50 *pag. 14*

Cilindrico

DN 4.50 - Large
DN 5.00 - Extra Large
DN 6.00 - Extra Extra Large



Serie 10 *pag. 6*

Cilindrico

DN 3.30 - Mini Short Neck
DN 3.75 - Short Neck
DN 4.50 - Large
DN 5.00 - Extra Large



Serie 30 *pag. 11*

Anatomico

DN 3.75 - Short Neck
DN 4.50 - Large
DN 5.00 - Extra Large



Serie 60 *pag. 15*

Conico

DN 3.75 - Short Neck
DN 4.50 - Large
DN 5.00 - Extra Large

Il protocollo chirurgico si limita ad indicare le modalità e le finalità di utilizzo dei vari accessori e strumenti chirurgici predisposti al caso, restando all'operatore professionista la corretta interpretazione dell'applicazione strumentale al singolo caso clinico.

Cilindrici

Conici


MINI SHORT NECK

M

SERIE 10

SERIE 50

SERIE 20

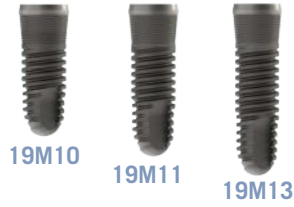

SHORT NECK

SN

LARGE

L

EXTRA LARGE

XL

EXTRA EXTRA LARGE

XX

Le immagini sono puramente a scopo esemplificativo




Conici

Anatomici

SERIE 60

SERIE 30

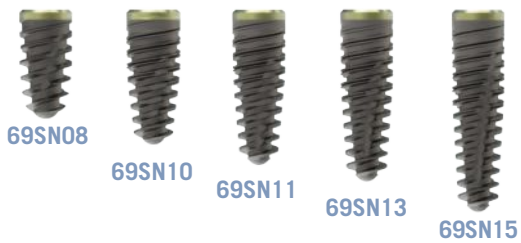

DN 3.30

DN 3.75



DN 4.50



DN 5.00

DN 6.00

* L'altezza 8 è priva di apice stondato

Protocollo chirurgico **standard** per densità ossea **D1 D2 D3 D4**

●	raccomandato								
○	opzionale								
○	opzionale solo in D1								
19M Mini Short Neck Ø 3.30									
	Ø max	1.8	2.0	2.4	2.7	3.0	3.3	3.3	3.30
rpm max		850			750		350	15	
Qualità dell'osso	D1 osso molto duro	●	●	○	●	○	●	●	D1
	D2 osso duro	●	●	○	●		●	○	D2
	D3 osso morbido	●	●	○	●		○	○	D3
	D4 osso molto morbido	●	●	○	●		○		D4

Protocollo chirurgico con **espansori ossei** per densità ossea **D4**

19M Mini Short Neck Ø 3.30							
	Ø max	1.8	2.0	3.2	2.7	3.3	3.30
rpm max		850		15		350	15
D4 osso molto morbido		●	●	●	●	○	D4



Protocollo chirurgico **standard** per densità ossea **D1** **D2** **D3** **D4**

●	raccomandato											
○	opzionale											
○	opzionale solo in D1											
19SN Short Neck Ø 3.75												+0.25mm
Ø max		1.8	2.0	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.75	3.75	3.75	
rpm max		850			750		650		350	15		
Qualità dell'osso	D1 osso molto duro	●	●	○	●	●	●	○	●	●		D1
	D2 osso duro	●	●	○	●	●	●		●	○		D2
	D3 osso morbido	●	●	○	●	●	○		○	○		D3
	D4 osso molto morbido	●	●	○	●	●	○					D4

Protocollo chirurgico **semplificato** per densità ossea **D2** **D3** **D4**

19SN Short Neck Ø 3.75									+0.25mm
Ø max		1.8	2.0	3.75	3.0	3.75	3.75	3.75	
rpm max		850		750		350		15	
Qualità dell'osso	D2 osso duro	●	●	●	●	●	●	●	D2
	D3 osso morbido	●	●	●	●	○	○		D3
	D4 osso molto morbido	●	●	●	●	○			D4

Protocollo chirurgico con **espansori ossei** per densità ossea **D4**

19SN Short Neck Ø 3.75									+0.25mm
Ø max		1.8	2.0	3.2	4.0	3.15	3.75	3.75	
rpm max		850			15		350		15
D4 osso molto morbido		●	●	●	●	●	○		D4

Protocollo chirurgico **standard** per densità ossea **D1 D2 D3 D4**

●	raccomandato											
○	opzionale											
○	opzionale solo in D1											
Qualità dell'osso	19L Large Ø 4.50											
	Ø max	1.8	2.0	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	4.2	4.5	4.5	4.50
	rpm max	850			750			650		350		15
	D1 osso molto duro	●	●	○	●	●	●	●	○	●	●	D1
	D2 osso duro	●	●	○	●	●	●	●		●	○	D2
	D3 osso morbido	●	●	○	●	○	●	○		●	○	D3
	D4 osso molto morbido	●	●	○	●	○	●	○		○		D4

Protocollo chirurgico **semplificato** per densità ossea **D2 D3 D4**

●	raccomandato											
○	opzionale											
○	opzionale solo in D1											
Qualità dell'osso	19L Large Ø 4.50											
	Ø max	1.8	2.0	3.75	4.5	3.6	4.5	4.5	4.50			
	rpm max	850		650		550		650		350		15
	D2 osso duro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D2	
	D3 osso morbido	●	●	○	●	●	○	○	○	D3		
	D4 osso molto morbido	●	●	○	●	●	○		D4			

Protocollo chirurgico con **espansori ossei** per densità ossea **D4**

●	raccomandato											
○	opzionale											
○	opzionale solo in D1											
Qualità dell'osso	19L Large Ø 4.50											
	Ø max	1.8	2.0	3.2	4.0	4.8	3.9	4.5	4.50			
	rpm max	850			15				350		15	
	D4 osso molto morbido	●	●	●	●	●	●	○	D4			



Protocollo chirurgico **standard** per densità ossea **D1 D2 D3 D4**

<input checked="" type="radio"/> raccomandato <input type="radio"/> opzionale												
19XL Extra Large Ø 5.00		RLO18	RMB20	RMB24	RMB27	RMB30	RMB33	RMB36	RMB42	AS5	MAS5	5.00
Ø max		1.8	2.0	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	4.2	5.0	5.0	5.00
rpm max		850			750			650		350	15	
Qualità dell'osso	D1 osso molto duro	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	D1
	D2 osso duro	●	●	○	●	○	●	○	●	●	○	D2
	D3 osso morbido	●	●	○	●	○	●	○	●	○	○	D3
	D4 osso molto morbido	●	●	○	●	○	●	●	○	○		D4







Protocollo chirurgico **semplificato** per densità ossea **D2 D3 D4**









<input checked="" type="radio"/> raccomandato <input type="radio"/> opzionale										
19XL Extra Large Ø 5.00		RLO18	RMB20	RCS00	RCL00	RCX00	RMB42	AS5	MAS5	5.00
Ø max		1.8	2.0	3.75	4.5	5.0	4.2	5.0	5.0	5.00
rpm max		850		650	550	650		350	15	
Qualità dell'osso	D2 osso duro	●	●	●	●	●	●	●	●	D2
	D3 osso morbido	●	●	●	○	●	●	○	○	D3
	D4 osso molto morbido	●	●	●	○	●	●	○		D4










Protocollo chirurgico **standard** per densità ossea **D2** **D3** **D4**

●	raccomandato
○	opzionale

29SN
Short Neck
Ø 3.75

							+0.25mm
	RLO18	RMB20	RCS00	AS3	MS00		3.75
Ø max	1.8	2.0	3.75	3.75	3.75		3.75
rpm max	850		650	350	15		
Qualità dell'osso	D2 osso duro	●	●	●	●	●	D2
	D3 osso morbido	●	●	●	●	○	D3
	D4 osso molto morbido	●	●	●	○		D4

									+0.25mm
	RLO18	RMB20	RMB27	RCS00	RCL00	AS4	ML00		4.50
Ø max	1.8	2.0	2.70	3.75	4.5	4.5	4.50	4.50	4.50
rpm max	850		750	650	550	350	15		
Qualità dell'osso	D2 osso duro	●	●	●	●	●	●	D2	
	D3 osso morbido	●	●	●	●	●	○	D3	
	D4 osso molto morbido	●	●	●	●	●	○	D4	

										+0.25mm
	RLO18	RMB20	RMB27	RCS00	RCL00	RCX00	AS5	MX00		5.00
Ø max	1.8	2.0	2.70	3.75	4.5	5.00	5.00	5.0	5.00	5.00
rpm max	850		750	650	550		350	15		
Qualità dell'osso	D2 osso duro	●	●	●	●	●	●	●	D2	
	D3 osso morbido	●	●	●	●	○	●	○	D3	
	D4 osso molto morbido	●	●	●	●	○	●	○	D4	



Protocollo chirurgico **standard** per densità ossea **D1 D2 D3 D4**

●	raccomandato											
○	opzionale											
○	opzionale solo in D1											
39SN Short Neck Ø 3.75												+0.25mm
Ø max		1.8	2.0	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.75	3.75	3.75	
rpm max		850			750		650		350	15		
Qualità dell'osso	D1 osso molto duro	●	●	○	●	●	●	○	●	●		D1
	D2 osso duro	●	●	○	●	●	●		●	○		D2
	D3 osso morbido	●	●	○	●	●	○		○	○		D3
	D4 osso molto morbido	●	●	○	●	●	○					D4

Protocollo chirurgico **semplificato** per densità ossea **D2 D3 D4**

39SN Short Neck Ø 3.75									+0.25mm
Ø max		1.8	2.0	3.75	3.0	3.75	3.75	3.75	
rpm max		850		750		350		15	
Qualità dell'osso	D2 osso duro	●	●	●	●	●	●		D2
	D3 osso morbido	●	●	●	●	○	○		D3
	D4 osso molto morbido	●	●	●	●	○			D4

Protocollo chirurgico con **espansori ossei** per densità ossea **D4**

39SN Short Neck Ø 3.75										+0.25mm
Ø max		1.8	2.0	3.2	4.0	4.8	5.0	3.75	3.75	
rpm max		850		15			350		15	
Lunghezza	39SN08	●	●	●	●	●	●	○		8,0
	39SN10	●	●	●	●	●		○		10,0
	39SN11	●	●	●	●	●		○		11,5
	39SN13	●	●	●	●			○		13,0
	39SN15	●	●	●	●			○		15,0












Protocollo chirurgico **standard** per densità ossea **D1 D2 D3 D4**







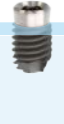


<input checked="" type="radio"/> raccomandato <input type="radio"/> opzionale													+0.25mm
39XL Extra Large Ø 5.00		RL018	RMB20	RMB24	RMB27	RMB30	RMB33	RMB36	RMB42	AS5	MA5	5.00	
Ø max		1.8	2.0	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	4.2	5.0	5.0	5.00	
rpm max		850			750			650		350	15		
Qualità dell'osso	D1 osso molto duro	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	D1
	D2 osso duro	●	●	○	●	○	●	○	●	●	○	○	D2
	D3 osso morbido	●	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	D3
	D4 osso molto morbido	●	●	○	●	○	●	●	○	○	○	○	D4











Protocollo chirurgico **semplificato** per densità ossea **D2 D3 D4**

<input checked="" type="radio"/> raccomandato <input type="radio"/> opzionale											+0.25mm
39XL Extra Large Ø 5.00		RL018	RMB20	RCS00	RCL00	RCX00	RMB42	AS5	MA5	5.00	
Ø max		1.8	2.0	3.75	4.5	5.5	4.2	5.0	5.0	5.00	
rpm max		850		650	550	650		350	15		
Qualità dell'osso	D2 osso duro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	D2
	D3 osso morbido	●	●	●	○	●	●	○	○	○	D3
	D4 osso molto morbido	●	●	●	○	●	●	○			D4



Protocollo chirurgico **standard H5** per tutte le densità ossee



● raccomandato									
○ opzionale									
59L Large Ø 4.50									
	RLO18	RMB20	RMB24	RMB27	RMB30	RMB33	RMB36	RMX36	4.50
	Ø max	1.8	2.0	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	4.50
	rpm max	850			750			650	
Qualità dell'osso	●	●	○	●	○	●	●	Tutte	+2.25mm



59XL Extra Large Ø 5.00										
	RLO18	RMB20	RMB24	RMB27	RMB30	RMB33	RMB36	RMX42	5.00	
	Ø max	1.8	2.0	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	4.2	5.00
	rpm max	850			750			650		15
Qualità dell'osso	●	●	○	●	○	●	○	●	Tutte	+2.25mm

59XX Extra Extra Large Ø 6.00											
	RLO18	RMB20	RMB24	RMB27	RMB30	RMB33	RMB36	RMB42	RMX52	6.00	
	Ø max	1.8	2.0	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	4.2	5.2	6.00
	rpm max	850			750			650		15	
Qualità dell'osso	●	●	○	●	○	●	○	●	●	Tutte	+2.25mm

Protocollo chirurgico opzionale **H7** (colletto sommerso)

59L Large Ø 4.50			+0.25mm
	RMX36	4.50	
	Ø max	3.6	4.50
rpm max	650	15	
Qualità dell'osso	●	Tutte	

59XL Extra Large Ø 5.00			+0.25mm
	RMX42	5.00	
	Ø max	4.2	5.00
rpm max	650	15	
Qualità dell'osso	●	Tutte	

59XX Extra Extra Large Ø 6.00			+0.25mm
	RMX52	6.00	
	Ø max	5.2	6.00
rpm max	650	15	
Qualità dell'osso	●	Tutte	



Protocollo chirurgico **standard** per densità ossea **D1** **D1-D2** **D3-D4**

●	raccomandato									
○	opzionale									
Qualità dell'osso	69SN Short Neck Ø 3.75									+0.25mm
	Ø max	1.8	2.0	2.7	3.0	3.75	4.0	4.0	3.75	
	rpm max	850			650			350	15	
	D1 osso molto duro	●	●	●	●	●	●	●	●	D1
	D1 - D2 osso duro e molto duro	●	●	○	○	●	●	○	○	D1 - D2
	D3 - D4 osso morbido e molto morbido	●	●		○	●	○			D3 - D4


Qualità dell'osso	69L Large Ø 4.50										+0.25mm
	Ø max	1.8	2.0	2.7	3.75	3.6	4.5	4.5	4.5	4.50	
	rpm max	850			650			550	350	15	
	D1 osso molto duro	●	●	●	RMB33(*)	●	●	●	●	●	D1
	D1 - D2 osso duro e molto duro	●	●	○	●	○	●	●	○	○	D1 - D2
	D3 - D4 osso morbido e molto morbido	●	●		●	○	●	○			D3 - D4

Qualità dell'osso	69XL Extra Large Ø 5.00											+0.25mm
	Ø max	1.8	2.0	2.7	3.75	4.5	4.2	5.0	5.0	5.0	5.00	
	rpm max	850			650			550	350	15		
	D1 osso molto duro	●	●	●	RMB33(*)	RMB36(*)	●	●	●	●	●	D1
	D1 - D2 osso duro e molto duro	●	●	○	●	●	○	●	●	○	○	D1 - D2
	D3 - D4 osso morbido e molto morbido	●	●		●	○	○	●	○			D3 - D4

(*) In presenza di osso Tipo D1 con una corticale ben rappresentata, sostituire i passaggi delle frese coniche con le frese cilindriche indicate. Gestire la profondità dell'Alesatore in funzione dello spessore della corticale presente, anche oltre la tacca di profondità.



T.F.I. System srl
Tissue Friendly Implants System
Via Giacomo Peroni 400-402
00131 Roma - Italy
www.tfisystem.it
info@tfisystem.it

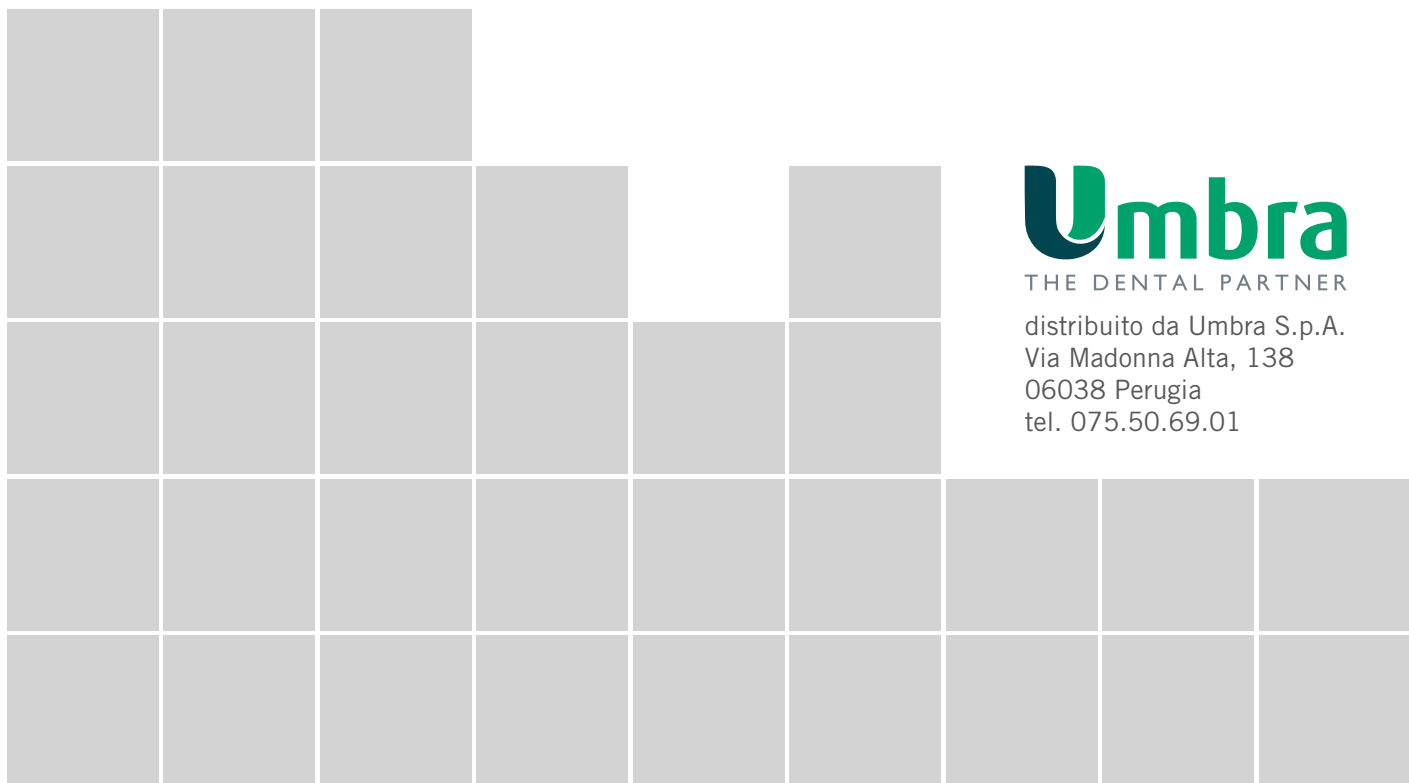

THE DENTAL PARTNER

distribuito da Umbra S.p.A.
Via Madonna Alta, 138
06038 Perugia
tel. 075.50.69.01