

PROCEDURA DI PRELIEVO E POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO



- Verificare sulla confezione il tipo di impianto, la sua lunghezza e la data di scadenza della sterilizzazione.

Se la confezione risulta danneggiata, il suo contenuto può aver perso la sterilità e pertanto non deve essere usata. La confezione è dotata di un sigillo antimanomissione di colore rosso che, se visibile, ne evidenzia l'avvenuta apertura.

Aprire la confezione ed estrarre il blister e le targhette adesive riportanti codice e lotto identificativi dell'impianto, da poter collocare una nella scheda medica del dottore e l'altra sul passaporto implantare del paziente.



- **Apertura del blister:**


l'assistente non sterile provvede alla rimozione del foglio protettivo, prendendone tra due dita l'angolo di strappo e tirandolo verso l'alto.

In questo modo viene esposta la boccetta contenente il tube con l'impianto che va posizionato su di un telino sterile in modo che da quel momento venga manipolata solamente dall'operatore con guanti sterili.



- **Apertura della boccetta:**

aprire il tappo su cui è solidale l'ampolla contenente l'impianto ed estrarla.

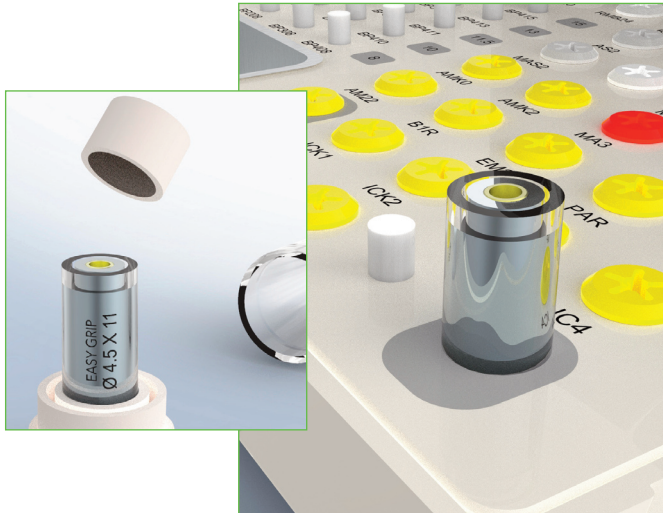

• **Apertura dell'ampolla:**

rimuovere il tappo dell'ampolla per esporre la testa dell'impianto alloggiato all'interno del tube in titanio.


• Per prelevare l'impianto in sicurezza è possibile inserire l'ampolla contenente l'impianto nell'apposito alloggiamento presente nel kit Tray.



• Prelevare l'impianto con il driver più idoneo al caso (aiuto meccanico o inserto per cricchetto) e trasportarlo sul sito implantare avvitandolo fino al completo posizionamento.

• L'ingaggio del driver avviene con una semplice pressione sull'impianto, durante l'inserimento l'avvitamento stesso del driver mantiene l'ingaggio attivo.

• La rimozione del driver dall'impianto si ottiene facendo ruotare delicatamente il driver in senso antiorario.

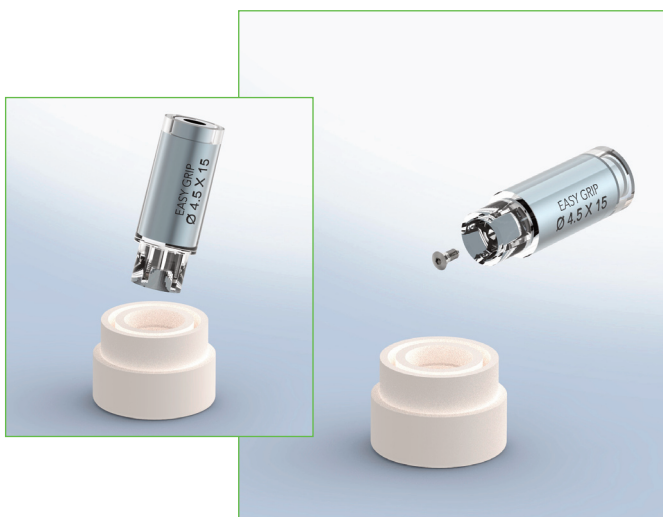

• La vite di chiusura è alloggiata nella parte inferiore dell'ampolla. Per accedervi rimuovere il tappo e svitarla.